



1 PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

	AVERTISSEMENT: Pour professionnel(le)s de santé formé(e)s uniquement
	AVERTISSEMENT: NE PAS modifier le logiciel WARD-CSS
	AVERTISSEMENT: S'assurer que la connexion internet est stable afin d'éviter le retard des alertes et notifications.
	AVERTISSEMENT: Attribuer chaque patient à un utilisateur ou une utilisatrice active pour recevoir les alertes et notifications
	AVERTISSEMENT: S'assurer que le son et les notifications sont activés sur le téléphone.
	AVERTISSEMENT: Attribuer le bon moniteur au patient pour recevoir les alertes et notifications
	AVERTISSEMENT: Garder le téléphone sur vous pour ne pas manquer les alertes et notifications
	ATTENTION: Éviter les accès non autorisés en conservant vos informations de connexion confidentielles
	ATTENTION: Utiliser WARD-CSS UNIQUEMENT aux fins prévues
	ATTENTION: Utiliser les dispositifs médicaux de monitoring des signes vitaux UNIQUEMENT aux fins prévues

	ATTENTION: Lire et comprendre le mode d'emploi des dispositifs médicaux utilisés en association avec le système WARD-CSS
	ATTENTION: Si vous rencontrez des problèmes avec les capteurs, contacter le fournisseur de ces derniers

À noter également:

- Vérifier si tous les patients ont un utilisateur ou une utilisatrice dans l'écran *Aperçu* de l'appli web.
- Vérifier s'il y a une ou des alertes actives. Vérifier si l'utilisateur ou utilisatrice associée au patient est au courant de cette attribution.

2 J'AI OUBLIÉ MON MOT DE PASSE:

- Ouvrez l'application WARD-CSS.
- Sélectionnez **Mot de passe oublié?**.
- Entrez votre adresse électronique et cliquez sur le lien reçu pour créer un nouveau mot de passe.

Un mot de passe doit contenir 8 caractères minimum et une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial.

Veillez noter que si vous vous trompez cinq fois de mot de passe, votre accès à l'application sera bloqué pendant une heure.

3 UN UTILISATEUR OU UNE UTILISATRICE M'A DEMANDÉ UN NOUVEAU MOT DE PASSE:

- Aidez l'utilisateur ou utilisatrice à obtenir un nouveau mot de passe par le biais de la page Connexion en cliquant sur [Mot de passe oublié?](#)
 - L'utilisateur ou utilisatrice doit saisir son adresse électronique. Il ou elle recevra ensuite un nouveau mot de passe.
- Vous ne pouvez pas créer un nouveau mot de passe pour un utilisateur ou une utilisatrice existante.

4 UN UTILISATEUR OU UNE UTILISATRICE A ÉTÉ SUPPRIMÉ(E):

Créez l'utilisateur ou utilisatrice à nouveau (uniquement pour les super utilisateurs ou utilisatrices) en cliquant sur [Paramètres](#) en haut de l'écran, puis sur

[Utilisateurs archivés](#) sur le côté gauche de l'écran et enfin sur [Utilisateurs réactivés](#) dans le coin supérieur droit.

5 LES INFORMATIONS DE L'UTILISATEUR OU UTILISATRICE COMPORTENT DES ERREURS:

- Recherchez l'utilisateur ou utilisatrice concernée en cliquant sur [Paramètres](#) en haut de l'écran, puis sur [Personnel](#) sur le côté gauche.
- Appuyez sur [l'icône Crayon](#) près du nom de l'utilisateur ou utilisatrice pour modifier ses informations.
- De là, vous pouvez corriger toutes les informations ayant besoin d'être modifiées.
- Rappelez-vous de confirmer les corrections en cliquant sur [Enregistrer](#).

6 OÙ PUIS-JE VOIR LES SIGNES VITAUX ANTÉRIEURS DANS L'APPLI WEB:

- Cliquez sur *l'encadré Patient* pour accéder aux *Détails du patient*.
- Lorsque vous sélectionnez l'une des valeurs vitales en temps réel, les valeurs en temps réel et des valeurs historiques peuvent être visualisées sous forme de données de tendance. Les valeurs antérieures sont affichées sur un graphique comme données de tendance contenant l'historique des signes vitaux. Les alertes sont affichées sur l'axe des x sous forme de points rouges.

À ce niveau, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- Voir à quelle heure une alerte s'est déclenchée et vérifier la valeur vitale qui l'a déclenchée.
- Afficher plusieurs graphiques de données de tendance en même temps : sélectionnez une valeur vitale pour l'ajouter au graphique de l'aperçu. Sélectionnez-la à nouveau pour la retirer de l'aperçu.
- Faire défiler le graphique pour accéder à une heure précise, en maintenant le curseur de votre souris sur le graphique et en déplaçant la ligne pointillée blanche vers la droite ou la gauche.
- Choisir d'afficher soit la dernière heure, les 2 dernières heures, les 6 dernières heures, les 12 dernières heures ou tout en cliquant sur **1 h, 2 h, 6 h, 12 h** ou **Tous**.
- Zoomer sur les données et faire un panoramique (déplacer) d'une période.

La dernière valeur mesurée pour le signe vital correspondant est affichée à droite du graphique. S'il manque des données, cela sera indiqué dans l'encadré du signal vital correspondant.

7 PUIS-JE GÉRER UNE ALERTE DANS L'APPLI WEB:

- Il n'est pas possible de gérer les alertes dans l'application web. Cela se fait dans l'application mobile.
- Dans l'application web, vous pouvez voir l'état des alertes en haut de l'écran. Elles sont indiquées dans un encadré **rouge**.

8 SOUHAITEZ-VOUS SIGNALER UN BOGUE OU SUGGÉRER DES AMÉLIORATIONS?

Vous pouvez signaler des bogues soit en choisissant le [Portail S.A.V.](#) sur la page Connexion, soit via le [Rapport d'erreur](#) dans le coin supérieur gauche du menu. Une fois ouvert, sélectionnez [Signaler un bogue](#) ou [Nouvelle fonction](#) qui ouvre le Portail S.A.V.

Dans le Portail S.A.V., vous pouvez signaler une erreur (un bogue), recommander une nouvelle fonction ou suggérer des améliorations.