













Forholdsregler ved anvendelsen

	ADVARSEL: Kun til uddannet sundhedspersonale
	ADVARSEL: WARD-CSS-softwaren må IKKE ændres
	ADVARSEL: Sørg for en stabil internetforbindelse for at undgå forsinkede alarmer og notifikationer
	ADVARSEL: Tildel hver patient en aktiv bruger for at modtage alarmer og notifikationer
	ADVARSEL Sørg for, at lyd og notifikationer er aktiveret på telefonen
	ADVARSEL: Tildel den korrekte monitor til patienten for at modtage alarmer og notifikationer
	ADVARSEL: Hav altid mobiltelefonen på dig, så du kan modtage alarmer og notifikationer
	FORSIGTIG: Undgå uautoriseret adgang ved at hemmeligholde loginoplysningerne
	FORSIGTIG: Brug KUN WARD-CSS i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse
	FORSIGTIG: Brug KUN medicinsk udstyr til monitorering af vitale værdier i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse

	FORSIGTIG: Læs og forstå brugsanvisningerne til det medicinske udstyr, der anvendes sammen med WARD-CSS
	FORSIGTIG: Kontakt sensorproducenten, hvis du oplever problemer med sensorerne

Bemærk også:

- Du skal være logget ind på den afdeling, du arbejder i.
- Kontrollér, at dine patienter er anført under *Mine patienter* i afsnittet *Overblik* i appen.
- Hvis den monitor, der er tilsluttet sensorerne, skal bruge internetforbindelse, så kontrollér, at en sådan er aktiv.

JEG HAR GLEMT MIN ADGANGSKODE:

- Åbn WARD-CSS appen.
- Vælg [Glemmt adgangskoden?](#).
- Indtast din e-mail, så modtager du et link til oprettelse af en ny adgangskode.

Adgangskoden skal bestå af mindst 8 tegn og indeholde et stort bogstav, et lille bogstav, et tal og et specialtegn.

Bemærk, at hvis du fem gange indtaster en forkert adgangskode, vil appen blive blokeret i 1 time.

Du kan aktivere stregekodelogin for at få hurtigere adgang til WARD-CSS' mobilapp. Det gør du ved at vælge [Opsætning af stregekodelogin](#) og følge instruktionerne. Du kommer til [Opsætning af stregekodelogin](#) ved at vælge [Hovedmenuen](#) (de tre streger) i øverste venstre hjørne på skærmen *Overblik*.

JEG FÅR IKKE NOTIFIKATIONER:

- Sørg for, at der er tændt for lyden, og at internetforbindelsen er aktiveret på din mobiltelefon.
- Du modtager muligvis ikke notifikationer, hvis internetforbindelsen i området er ustabil. Kontrollér regelmæssigt din telefon på din vagt.
- Kontrollér, at du er logget ind på den rigtige afdeling. Det gør du ved at vælge [Hovedmenuen](#) (de tre streger) i øverste venstre hjørne af *Overblik*.
 - Den afdeling, du er logget ind på, vises under [Afdeling](#).
 - Tryk på [Afdeling](#).
 - Vælg derefter den afdeling, du ønsker at være aktiv på.
 - Du kan ikke være aktiv på to afdelinger på samme tid.
- Kontrollér, at dine patienter er anført under *Mine patienter* i *Overblik*.
- Hvis dine patienter er anført under *Andre patienter på afdelingen*, kan du ændre dette ved at vælge den pågældende patient for at åbne *Patientoversigten*. Tryk derefter på [Patientmenuen](#) (de tre prikker) i øverste højre hjørne, og vælg [Tilføj patient til din liste](#).

JEG KAN IKKE FINDE PATIENTEN I MOBILAPPEN:

- Kontrollér, om du er logget ind på din afdeling. Det gør du ved at vælge [Hovedmenuen](#) (de tre streger) i øverste venstre hjørne af *Overblik*.
 - Vælg [Afdeling](#), og vælg den rigtige afdeling.
 - Du kan ikke være aktiv på to afdelinger på samme tid.

JEG MODTAGER INGEN PATIENTDATA I MOBILAPPEN:

- Kontrollér, at der er internetforbindelse på din mobiltelefon.
- Kontrollér, at patientens sensorer er tilsluttede:
 - Tryk på patienten i *Overblik* i WARD-CSS' mobilapp for at komme ind i *Patientoversigten*.
 - Vælg i *Patientoversigten* punktet **Sensorer** i øverste højre hjørne. Der vises en skærm med den tilsluttede monitor, sensorerne og sensorernes batteristatus.
 - Følg sensorproducentens anvisninger, hvis en sensor ikke virker.

MONITOREN FORBUNDET MED PATIENTEN VISES IKKE LÆNGERE I MOBILAPPEN:

- Kontrollér, at der er internetforbindelse på din mobiltelefon.
- Kontrollér, at monitoren er tilsluttet (samt internetforbindelsen, hvis en sådan skal bruges til monitoren) og forbundet med patienten, og at patientens værdier er synlige på monitoren.
- Kontrollér, om signalikonet på *Patientoversigten* lyser grønt. Hvis ikonet er gråt, er patienten ikke tildelt en monitor.
 - Fra *Patientoversigten*: Se efter, om der er et monitornavn i øverste højre del af skærmen ud for patientens navn. Tryk på **Patientmenuen** (de tre prikker) i øverste højre hjørne af *Patientoversigten*, hvis monitoren ikke vises her.
 - Tryk på **Tilføj monitor til patient**.
 - Sørg for, at det er monitoren ved patientens seng, som du tilføjer til patienten i appen.

HVOR FINDER JEG TIDLIGERE VITALE VÆRDIER I MOBILAPPEN?:

- Ønsker du en oversigt over vitale værdier, så vælg patienten i *Oversigt* for at komme ind i *Patientoversigten*.
- Når du vælger en af realtidsværdierne, åbnes en oversigt med visualisering af både realtids- og historiske værdier som trenddata. De tidligere værdier vises på en graf som trenddata med de historiske vitale værdier. Alarmer vises på x-aksen som røde prikker. Her kan du gøre følgende:
 - Se, hvornår en alarm blev udløst og hvilken vital værdi, der udløste den.
 - Få vist flere grafer på samme tid: klik på en vital værdi for at tilføje den til oversigtsgrafen, eller klik igen for at fjerne den fra oversigten.
 - Bladre i diagrammet til et bestemt tidspunkt: Hold fingeren i et sekund på grafen, og træk den hvide stiplede linje til højre eller venstre.
 - Vælg at se enten seneste 1 time, 2 timer, 6 timer, 12 timer eller hele tidsperioden.

Den sidst målte værdi af den respektive vitale værdi vises til højre for diagrammet. Hvis data mangler, vil det blive angivet i feltet for den respektive vitale værdi.

ØNSKER DU AT INDBERETTE EN FEJL ELLER FORESLÅ FORBEDRINGER?

Du kan indberette fejl direkte fra enten loginsiden ved at vælge [Serviceportal](#) eller via [Hovedmenuen](#) (de tre streger) i øverste venstre hjørne i *Oversigt* i appen. Vælg derefter [Rapportér fejl](#), så åbnes serviceportalen.

I serviceportalen kan du indberette en fejl, anbefale nye funktioner eller foreslå forbedringer.