













Forholdsregler ved anvendelsen

| | |
|---|--|
|  | ADVARSEL: Kun til uddannet sundhedspersonale |
|  | ADVARSEL: WARD-CSS-softwaren må IKKE ændres |
|  | ADVARSEL: Sørg for en stabil internetforbindelse for at undgå forsinkede alarmer og notifikationer |
|  | ADVARSEL: Tildel hver patient en aktiv bruger, som kan modtage alarmer og notifikationer |
|  | ADVARSEL: Sørg for, at lyd og notifikationer er aktiveret på telefonen |
|  | ADVARSEL: Tildel den korrekte monitor til patienten for at modtage alarmer og notifikationer |
|  | ADVARSEL: Hav altid mobiltelefonen på dig, så du kan modtage alarmer og notifikationer |
|  | FORSIGTIG: Undgå uautoriseret adgang ved at hemmeligholde loginoplysningerne |
|  | FORSIGTIG: Brug KUN WARD-CSS i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse |
|  | FORSIGTIG: Brug KUN medicinsk udstyr til monitorering af vitale værdier i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse |

| | |
|---|---|
| | |
|  | FORSIGTIG: Læs og forstå brugsanvisningerne til det medicinske udstyr, der anvendes sammen med WARD-CSS |
|  | FORSIGTIG: Kontakt sensorproducenten, hvis du oplever problemer med sensorerne |

Bemærk også:

- Kontrollér, om alle patienter har en bruger i webappen i *Oversigt*.
- Kontrollér, om der er nogen aktive alarmer. Kontrollér, om den bruger, der er tilknyttet patienten, er klar over det.

JEG HAR GLEMT MIN ADGANGSKODE:

- Åbn WARD-CSS-appen.
- Vælg [Glemmt adgangskoden?](#).
- Indtast din e-mail, så modtager du et link til oprettelse af en ny adgangskode.

Adgangskoden skal bestå af mindst 8 tegn og indeholde et stort bogstav, et lille bogstav, et tal og et specialtegn.

Bemærk, at hvis du fem gange indtaster en forkert adgangskode, vil appen blive blokeret i 1 time.

EN BRUGER HAR BEDT MIG OM EN NY ADGANGSKODE:

- Brugeren kan få en ny adgangskode via loginsiden ved at vælge [Glemmt adgangskoden?](#).
 - Brugeren skal indtaste sin e-mailadresse og vil derefter modtage en ny adgangskode.
- Du kan ikke oprette en ny adgangskode for en eksisterende bruger.

EN BRUGER ER BLEVET SLETTET:

- Opret brugeren igen (kun superbrugere) ved at vælge [Indstillinger](#) øverst på skærmen efterfulgt af [Arkiverede brugere](#) i venstre side af skærmen og til sidst [Genaktivér brugere](#) i øverste højre hjørne.

DER ER FEJL I EN BRUGERS INFORMATIONER:

- Find den pågældende bruger ved at trykke på [Indstillinger](#) øverst på skærmen og derefter [Personale](#) i venstre side.
- Tryk på [Blyantsikonet](#) ved siden af brugerens navn for at redigere brugeren.
- Det er her, du kan korrigere informationer, der skal ændres.
- Husk at bekræfte korrektionerne ved at trykke på [Gem](#).

HVOR FINDER JEG TIDLIGERE VITALE VÆRDIER I WEBAPPEN?

- Tryk på *Patientboksen* for at åbne *Patientoplysninger*.
- Når du trykker på en af realtidsværdierne, vises en visualisering af både realtids- og historiske værdier som trenddata. De tidligere værdier vises på en graf som trenddata med de historiske vitale værdier. Alarmer vises på x-aksen som røde prikker. Her kan du gøre følgende:
 - Se, hvornår en alarm blev udløst og hvilken vital værdi, der udløste den.
 - Få vist flere trenddata-grafer på samme tid: Tryk på en vital værdi for at tilføje den til oversigtsgrafen, eller tryk igen for at fjerne den fra oversigten.
 - Bladre i diagrammet til et bestemt tidspunkt: Hold musemarkøren over grafen, og flyt den hvide stiplede linje til højre eller venstre.
 - Vælg at se enten seneste 1 time, 2 timer, 6 timer, 12 timer eller hele tidsperioden ved at trykke på **1time**, **2time**, **6time**, **12time** eller **Alle**.
 - Zoome ind på dataene og panorere (flytte) tidsrammen.

Den sidst målte værdi af den respektive vitale værdi vises til højre for diagrammet. Hvis data mangler, vil det blive angivet i feltet for den respektive vitale værdi.

KAN JEG HÅNDTERE EN ALARM I WEBAPPEN?

- Det er ikke muligt at håndtere alarmer i webappen. Dette foregår i mobilappen.
- I webappen kan du se status for alarmer øverst på skærmen. Det vises i en **rød** boks.

ØNSKER DU AT INDBERETTE EN FEJL ELLER FORESLÅ FORBEDRINGER?

Du kan indberette fejl direkte fra loginsiden ved at vælge **Serviceportal** eller via **Rapportér fejl** i øverste venstre hjørne af menuen. Vælg derefter **Rapportér fejl**, **Teknisk support** eller **Ny funktion**, så åbnes serviceportalen.

I serviceportalen kan du indberette en fejl, anbefale nye funktioner eller foreslå forbedringer.